

PARAFFIN CLEANER

Principio

I microtomi sono contaminati da residui di paraffina durante il processo di taglio dei campioni. Una pulizia regolare è essenziale per una buona manutenzione dell'apparecchiatura. Questi residui possono essere rimossi con il detergente per paraffina, la cui composizione (olio minerale in un mezzo alcolico) è specificamente studiata per la pulizia non tossica del microtomo.

Reagenti

Codice	Descrizione del prodotto
256876	Detergente per paraffina per diagnosi clinica (*)

Procedimento

1. Pulire innanzitutto il microtomo con una spazzola per rimuovere la paraffina non aderente allo strumento.
2. Spruzzare la parte dello strumento con uno spray per la pulizia della paraffina.
3. Pulire leggermente con un panno o con carta fine per rimuovere i residui di paraffina disciolti.
4. Lasciare asciugare per qualche istante e il microtomo è pronto per l'uso, completamente pulito.

Nota tecnica

Il microscopio utilizzato deve soddisfare i requisiti di un laboratorio di diagnostica clinica.

Immagazzinamento

La soluzione deve essere conservata a temperatura ambiente.

Data di scadenza

Se conservato alla temperatura indicata e in un contenitore ben chiuso, il prodotto può essere utilizzato fino alla data di scadenza indicata sulla confezione.

Note sull'uso

Per evitare errori, la tecnica deve essere eseguita da personale qualificato. Solo per uso professionale. È necessario rispettare le norme nazionali in materia di sicurezza sul lavoro e di garanzia della qualità. Prima dell'uso, consultare la scheda di sicurezza.

Conseils sur l'élimination des déchets

Le soluzioni usate e scadute devono essere smaltite come rifiuti pericolosi in conformità alle normative locali sullo smaltimento dei rifiuti. In caso di ulteriori domande sullo smaltimento o sulla procedura, si prega di contattarci via e-mail: info.es@itwreagents.com. All'interno dell'UE sono applicabili i regolamenti basati sul Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle

sostanze e delle miscele e che modifica e abroga il Regolamento (CE) n. 1272/2008. Si applicano le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e la modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella sua versione attuale.

Classificazione delle sostanze pericolose

Osservare la classificazione delle sostanze pericolose riportata sull'etichetta e le informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Produttore

Panreac Química S.L.U. une société ITW
C/Garraf, 2 - Polígono Pla de la Bruguera
E-08211 Castellar del Vallès
(Barcelona) España
Tel. (+34) 937 489 400
Fax (+34) 937 489 401

(*) Certificato CE secondo IVDR 2017/746, per uso professionale.

