



Ácido Clorhídrico 10 M en viales de 10 ml para análisis de orina 24 h

El análisis de orina 24 horas es común para la detección y el diagnóstico de tumores así como de la formación de cálculos renales. Debido a este largo período de toma de la muestra, la orina debe ser estabilizada.

PanReac AppliChem ofrece viales con 10 ml de ácido clorhídrico concentrado para esta función.

Esta toma de muestra se realiza para la determinación de diversas moléculas relevantes para el diagnóstico como son el ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA), las catecolaminas, metanefrinas, el ácido homovanílico, así como oxalatos y citratos.

La cuantificación del 5-hidroxiindolacético (5-HIAA), metabolito de la serotonina, sirve para la diagnosis de tumores del intestino delgado, caracterizados por una elevada síntesis de esta hormona.

Las catecolaminas y metanefrinas pueden ser indicadores de un feocromocitoma, un tumor que se sitúa en la glándula suprarrenal.


El ácido homovanílico es el principal metabolito de la dopamina y es útil en el diagnóstico del neuroblastoma.

Los oxalatos y citratos nos dan la medida en que el riñón pueda estar formando cálculos.

El ácido se agrega al recipiente de recogida de la orina.

Aplicación

- Hospitales generales: unidad de preanalítica del servicio de análisis clínicos, laboratorio de bioquímica
- Hospitales pequeños: servicio de análisis clínicos, laboratorio de bioquímica
- Supervisión de laboratorio de análisis
- Supervisión de enfermería
- Facultativo de orinas (dentro del análisis clínico)

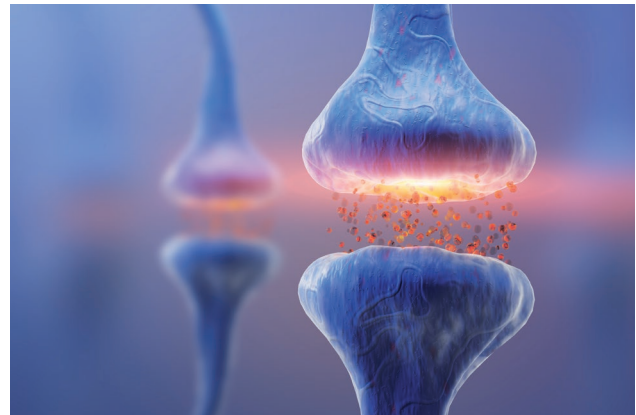

Principales ventajas

- Comodidad y rapidez: vial listo para su uso y de concentración adecuada
- Seguridad: mínima manipulación sin exposición a los vapores de ácido



Descripción	Código	Pack
Ácido Clorhídrico 10 mol/l (10N) solución valorada	187051.0905	100 x 10 ml



IP-047ES;201812

IP-047ES

AppliChem GmbH
Ottoweg 4
DE-64291 Darmstadt
Germany
Phone +49 6151 9357-0
Fax +49 6151 93 57-11
info.de@itwreagents.com

Nova Chimica Srl
Via G. Galilei, 47
I-20092 Cinisello Balsamo
(Milano) Italy
Phone +39 02 66045392
Fax +39 02 66045394
info.it@itwreagents.com

PanReac Química SLU
Garraf, 2
Polígono Pla de la Bruguera
E-08211 Castellar del Vallès
Barcelona (Spain)
Phone +34 937 489 400
Fax +34 937 489 401
info.es@itwreagents.com



www.itwreagents.com